

醫友 吸引器 (外、婦科兩用)

DOCTOR'S FRIEND SUCTION PUMP DF-350

衛署醫器製字第 001475 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書，並遵照指示使用。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項請參照原廠資料。

產品敘述：本產品動力來源使用無油式真空幫浦，產生真空負壓的吸力作為抽吸的動力來源，並適用於各大中小型醫院診所、醫療護理、居家照顧、安養中心等等。

適用症(用途說明)：對於因呼吸道症狀得使用抽痰之設備時，使用藉由真空力之大小由吸引導管做抽吸功能。

Quality Speaks Itself

功能介紹

- 儀器外殼全部使用A.B.S. 塑鋼材料射出成型。
- 壓力大小可由壓力調節鈕調整，真空壓力大小採數位顯示，易判讀。
- 吸引瓶容量為3000 cc 兩支，外科及婦產科可獨立使用。
- 使用者可由外婦科轉換鈕選擇SUCTION用於一般抽吸用途；或O.B.S. 可用於人工流產及大口徑抽吸用，可減少轉換吸引管的麻煩，爭取時效。
- 吸引瓶與儀器間設有一過濾器，可過濾雜質。
- 吸引瓶為塑膠 PC 材料製成，瓶蓋附手把，方便使用者清洗，且耐撞擊及高溫、高壓消毒。
- 當吸力超過 650mm/hg 時，安全警示聲即會啟動，發出嗶~嗶~聲，若持續30秒時，安全警示聲會發出嗶~~~連續聲警告，此時壓力需調至550mm/hg以下，警示聲才會停止。

標準配件

1. 矽質吸引管 (小) 180cm 2條
2. 矽質吸引管 (大) 180cm 1條
3. 吸引導管 1條
4. 腳踏開關 (氣壓式) 1個
5. 過濾器 (大) 2個

規格使用



輸出馬力 250W 1/3HP
最大吸力 720 mm/hg
真空流量 80 liter/min
瓶子容量 3000c.c.+3000c.c.
腳踏開關 氣壓式
機器尺寸 長45x寬35x高84 (公分)
機器重量 19.5 KGS

細部說明

- 1 真空壓力數位顯示器
- 2 壓力調節鈕 (藍)
- 3 電源開關
- 4 管子固定夾 (外科)
- 5 過濾器 (大)
- 6 外科接頭
- 7 吸引瓶 3000cc (外科用)
- 8 水位控制器 (小)
- 9 數位型計時器
- 10 外、婦科轉換鈕 (紅)
- 11 計時器開關
- 12 管子固定架 (婦科)
- 13 水位控制器 (大)
- 14 婦科接頭
- 15 吸引瓶 3000cc (婦科用)

側面說明

- 1 電源線
- 2 腳踏開關插入孔
- 3 無絡絲開關
- 4 煞車輪 (四個)
- 5 腳踏開關 (氣壓式)

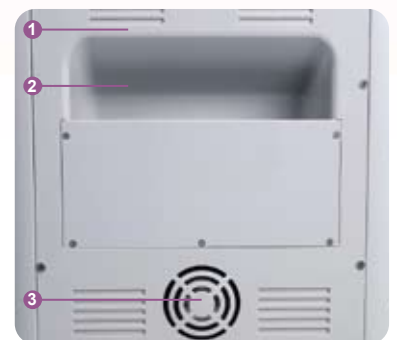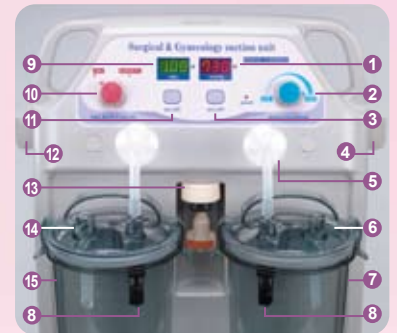

1 維修蓋 2 置物箱 3 散熱風扇

無油式真空幫浦 (90-026)

OIL-LESS VACUUM PUMP
Twin cylinder piston pump design.



人性設計：
低噪音、耐磨損
體積輕巧：
耗電省、壽命長
完全無油：
無污染、免保養

規格說明

電 壓	120V	240V
電 流	2.4A	1.2A
電 容	26uf	13uf
轉 數	1720	
極 數	4	
輸出能量	250W 1/3HP	
最大流量	80 liter/min	
最大吸力	700~720 mm/hg	
重 量	9.0 kgs	
溫控保護裝置，自動回覆		



DOCTOR'S FRIEND

總騰儀器股份有限公司
新北市汐止區茄苳街156號
T 02-86486194 F02-86489678

總誠儀器股份有限公司
台北市內湖區潭美街588號2樓
T 02-86482226 F02-86482262